



KirPACS  
Maj 2012  
jan@scanread.eu

# Konceptet

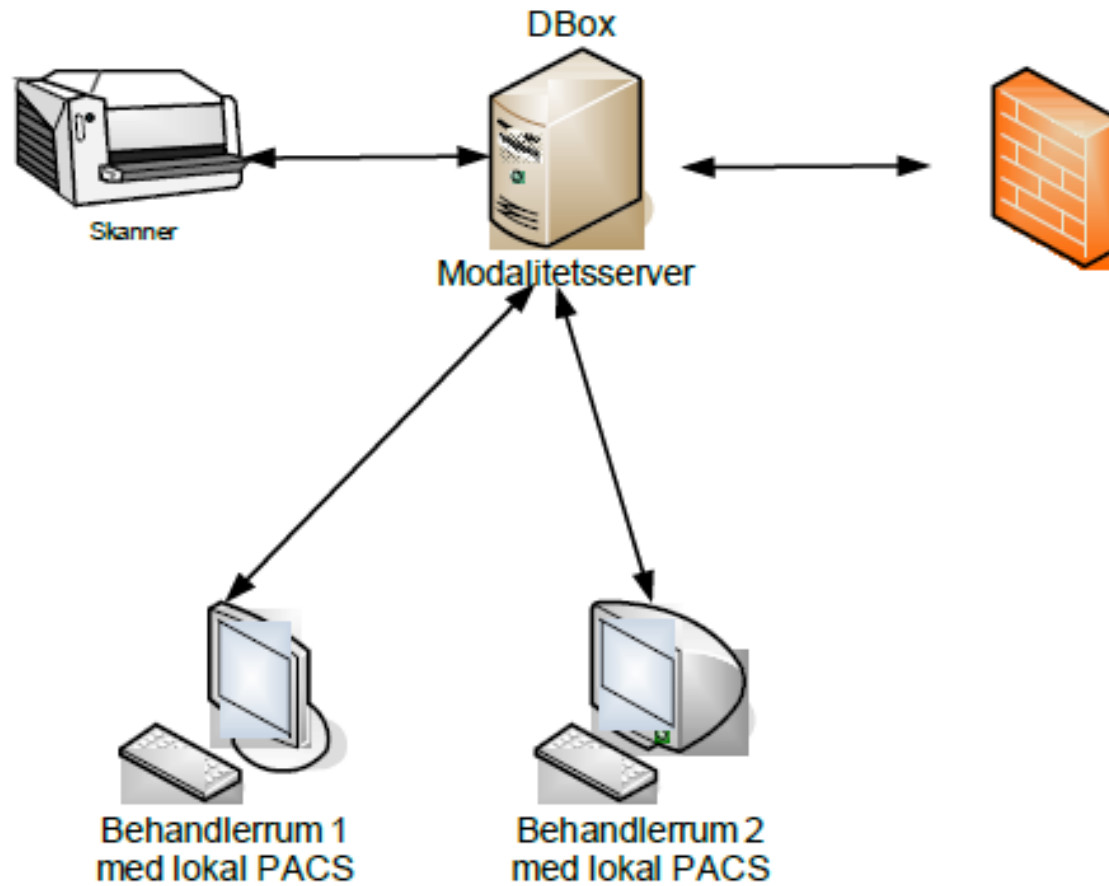


# Dicom flow ved optagelse

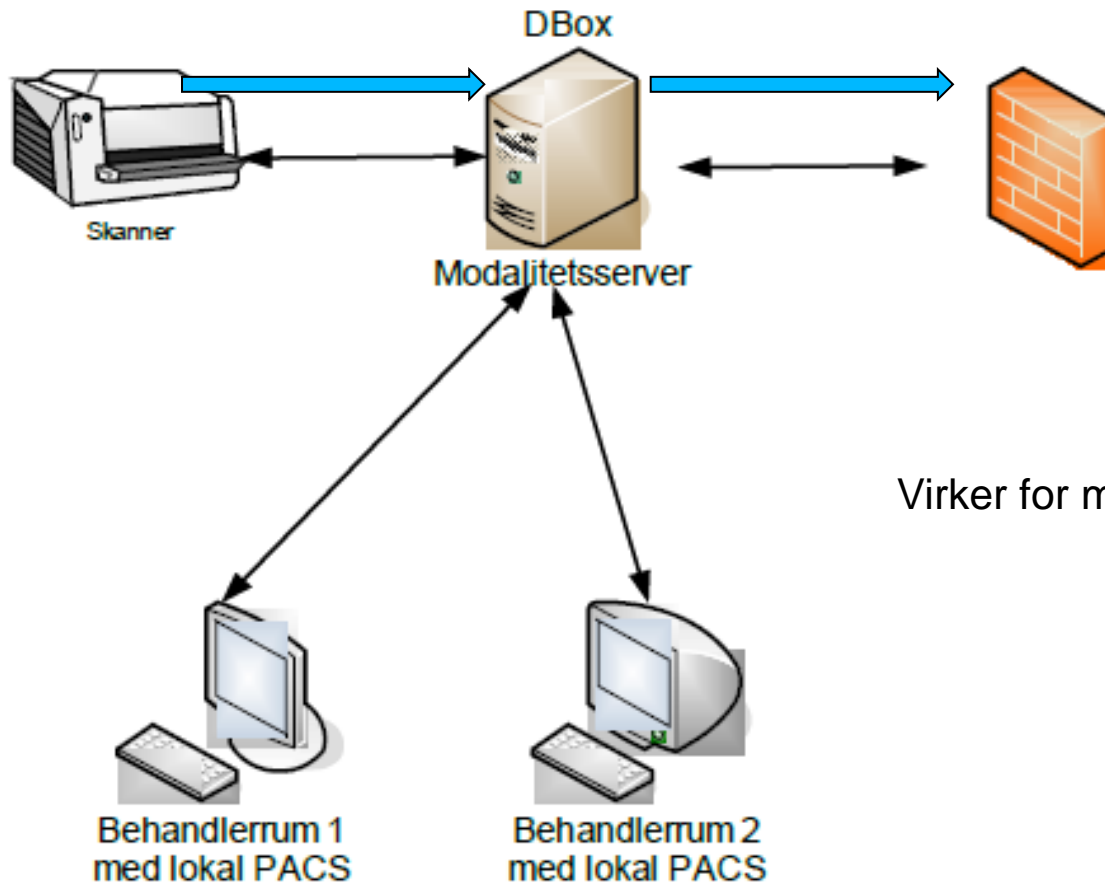

Virker for mere end 100 klinikker



# Dicom flow lokalt ved optagelse

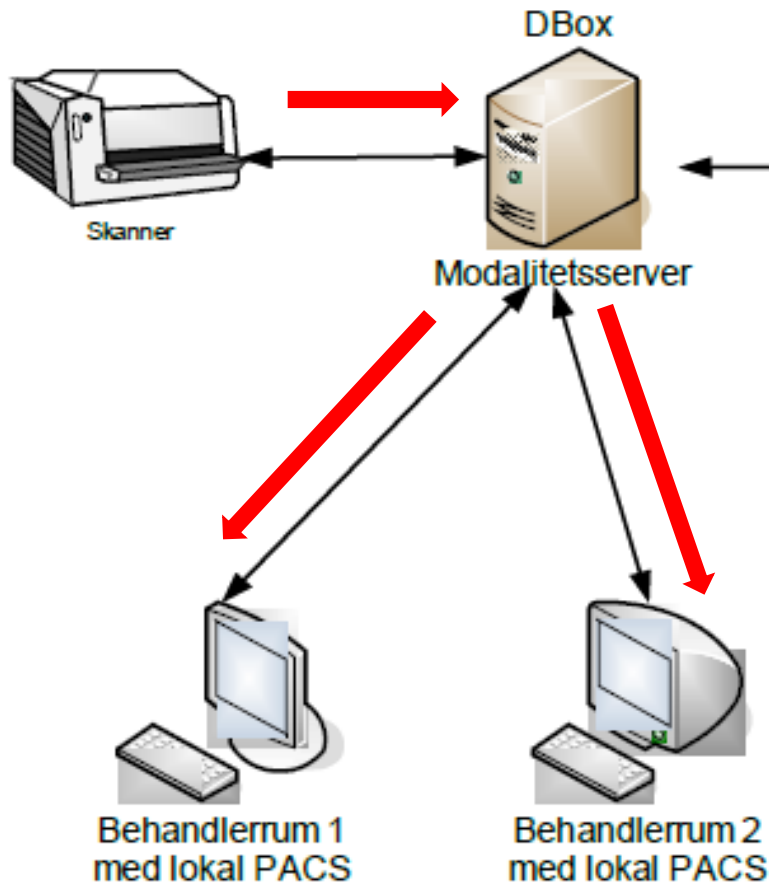

Virker ikke i 50% af installationerne




Årsager til dette:

1. Link mellem DBox og lokal behandler rum ikke etableret (selvom Clear Canvas er installeret)
2. Klinik benytter anden viewer end Clear Canvas og kender ikke konsekvensen

Det medfører:

1. Klinikker henter billeder fra KirPACS et af gangen og undrer sig over processen

# Dicom flow ved genetablring og dicom deling mellem klinikker

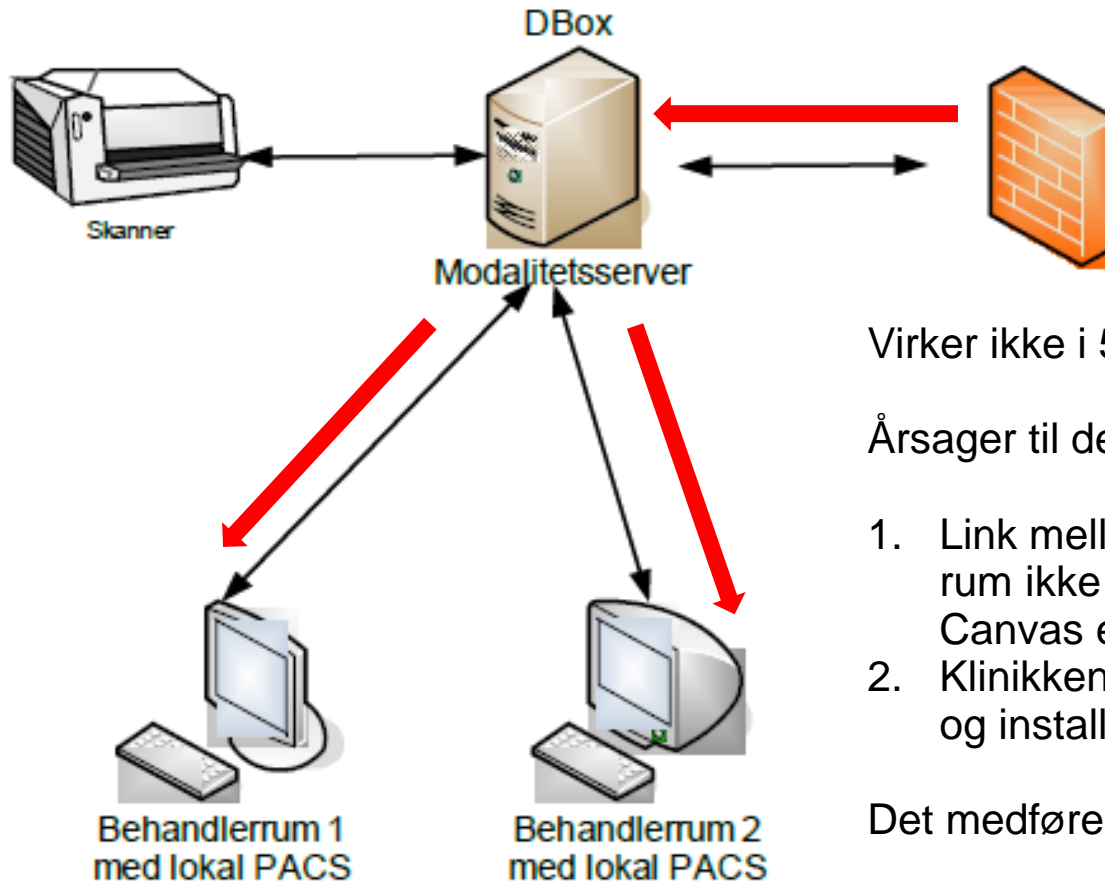

Virker ikke i 50% af installationerne




Årsager til dette:

1. Link mellem DBox og lokal behandler rum ikke etableret (selvom Clear Canvas er installeret)
2. Klinikken anvender ikke clear canvas og installatør kender ikke dette flow

Det medfører:

1. Klinikker kan ikke dele billeder

## Dicom flow indlæsning af CD

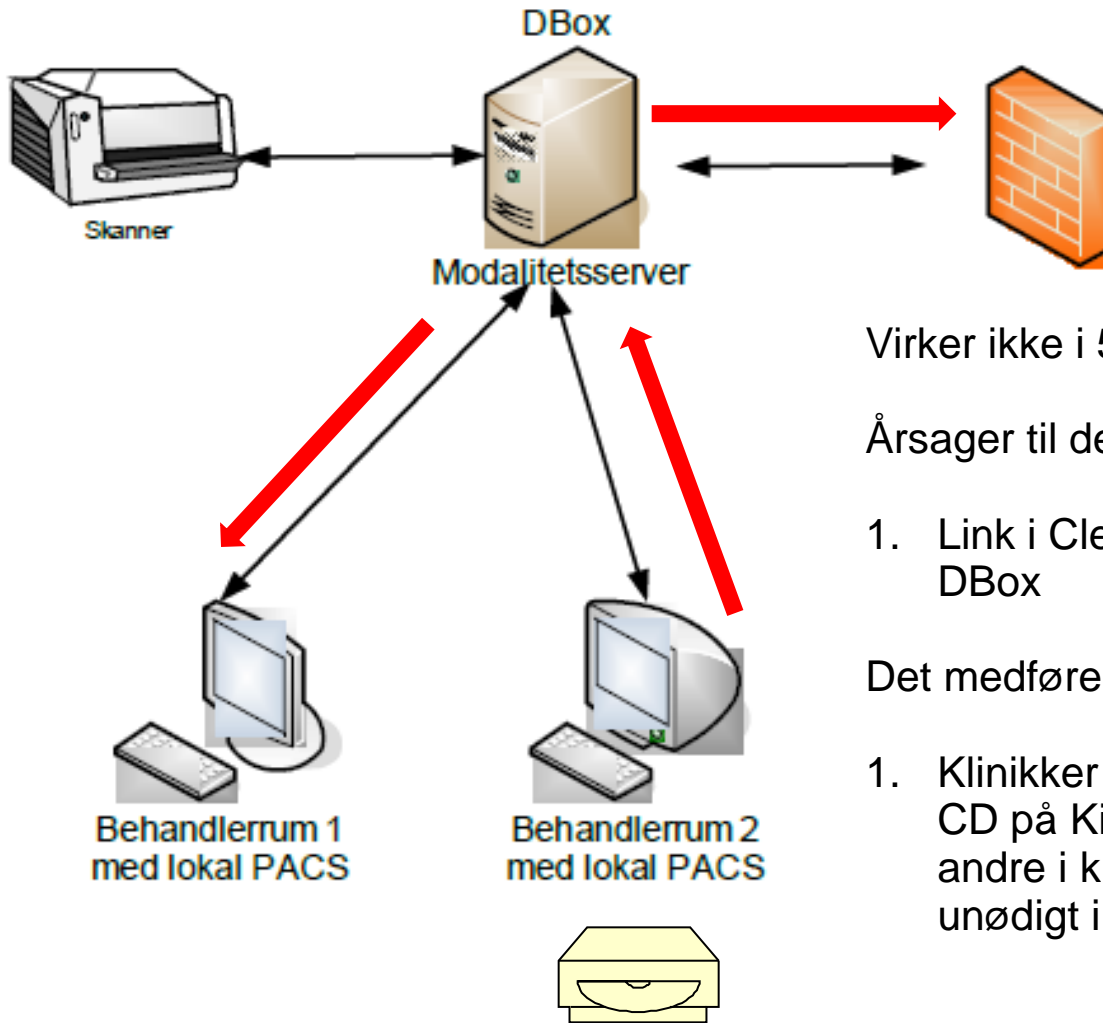

Virker ikke i 50% af installationerne



Årsager til dette:

1. Link i Clear Canvas ikke defineret for DBox

Det medfører:

1. Klinikker kan ikke gemme billeder fra CD på KirPACS eller dele dem med andre i klinikken. CD opbevares unødigt i brandskab.

## Nyheder

- DBox protokollen er videreudviklet, så den kan køre på http / https porte hvilket vil medføre, at VPN'er ikke længere er nødvendig. Kommer med release 1.17
- ScanREAD flytter server miljø i juni. Hvis der benyttes statisk adresse definition for scanread.dk i dbox installationen, så send en email og jeg fjern opdaterer adressen i Dboxen.
- Nyeste DBox software kan snart hentes over http, så I undgår FTP klienten.
- Der arbejdes på at konstanskontroller og andet CR relateret information kan snart tilgås i KirPACS. Leverandører får adgang.